



## MASCHERA SIGI DPI 02 per protezione da COVID-19

Questo prodotto è stato fabbricato in accordo con il Regolamento (EU) 2016/425, per uso di base, PPE-R/02.075 VERSION 2 dispositivi di protezione respiratoria. Maschera filtrante solo per protezione da COVID 19. Requisiti, test, marcature in accordo col certificato n° 20/3210/00/0161 by AITEX, Plaza Emilio Sala n° 1, Alcoi, Spain, Notified Body 0161.

La mascherina SIGI DPI 02 consiste di cinque strati di polipropilene tessuto non tessuto.

### Raccomandazioni d'uso:

#### Avvertenze:

- Questa mascherina è prodotta solo per protezione contro COVID-19
- Posizionamento mascherina filtrante (controllare prima dell'uso) verificare la presenza di danni sulla mascherina prima dell'uso
- E' improbabile che i requisiti contro le perdite siano rispettati se peli di barba sono sottostanti la guarnizione facciale
- La mascherina è inefficace in condizioni di pessima qualità dell'aria (presenza di contaminanti, carenza d'ossigeno)
- La mascherina è inefficace in presenza di atmosfera esplosiva
- Questo prodotto non è resistente al fuoco e non deve essere usato in presenza di fiamme libere
- L'utente deve essere a conoscenza delle modalità d'uso
- Non usare in zone a rischio esplosione
- Il DPI non deve essere usato contro rischi diversi da quanto indicato.

### Attenzione: un solo utilizzo

#### Istruzioni d'uso e manutenzione:

- lavarsi le mani con alcool o detersivo a base di sapone e acqua prima di indossare il DPI
- coprire la bocca e il naso con la mascherina e assicurarsi che non ci sia spazio tra il viso e la mascherina per l'intero perimetro di contatto
- regolare il nasello di metallo per una perfetta aderenza
- posizionare i lacci intorno alle orecchie e usare il gancio di plastica
- si raccomanda di posizionare la mascherina più in alto possibile e vicino agli occhi per una perfetta aderenza
- evitare di toccare la mascherina nella parte esterna (se succede, lavarsi le mani con alcool o detersivo a base di sapone)
- VERIFICA DELL'ADERENZA: coprire la parte frontale della mascherina facciale con entrambe le mani assicurandosi di non compromettere la tenuta sul volto; espirare rapidamente; se si avvertono perdite di aria intorno al naso, riposizionare la mascherina facciale più in alto per eliminare la perdita. Ripetere la prova di tenuta come sopra;
- gettare la mascherina dopo 8 ore d'uso o nel caso diventi umida

Questa mascherina filtrante è prodotta solo per protezione da COVID-19. Come richiesto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per questo specifico uso, il fattore di protezione nominale fornito da questa mascherina è lo stesso delle mascherine FFP2 definito in EN 149:2001+A1:2009. Questa mascherina filtrante non è una mascherina per uso generale e non deve essere usata per scopi diversi dalla protezione da COVID-19.

## Livelli ottenuti

VALORE OTTENUTO: SUPERATO

### Massima penetrazione del materiale filtrante:

Classificazione	95 l/min % Max.
FFP2	6

*Il livello FFP2 è un parametro guida dallo standard EN 149: 2001 + A1: 2009, non applicabile per RfU PPE-R/02.075 VERSION 2 dato che il metodo finale di validazione per COVID 19 è del tipo SUPERATO/NON SUPERATO.*

**Stoccaggio:** tenere il DPI lontano da inutili esposizioni alla luce solare, in luogo asciutto e protetto da agenti aggressivi.

**Imballaggio:** busta di plastica.

### Data di produzione:


**Info&documentazione:** [www.grupposigi.it](http://www.grupposigi.it)

Anno: 2020  2021  2022

Mese: 1  2  2  4  5  6

7  8  9  10  11  12

## Legenda pittogrammi:

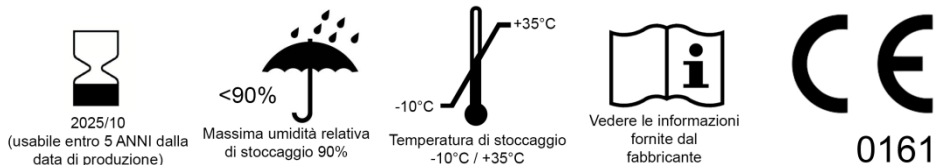

## Produttore:

GRUPPO SIGI S.R.L.S.  
Via Don Luigi Sturzo, 24  
63831 Rapagnano (FM) – Italy  
Tel. +39 3391579290