

# TEST SIEROLOGICO - COVID-19 IgM/IgG



## CARATTERISTICHE

### VELOCE

Risultato del test in 10 min.

### ACCURATO

Sensibilità: 95,92%, Specificità: 94,00%

Precisione: 94,95%

### FACILE DA USARE

Nessuna conoscenza speciale richiesta utilizzare 10 uL di siero o plasma



Il test rapido COVID-19 IgM / IgG Rapid si basa sul principio di un'immunocromatografia in test in vitro per la determinazione qualitativa delle IgM o IgG specifiche del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) in siero o plasma. Il test rapido COVID-19 IgM / IgG fornisce ai pazienti il processo decisionale clinico sospettato di infezione da virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Applicabile a: screening clinico, screening di comunità, medico di famiglia, screening scolastico, screening aziendale, pazienti asintomatici

## PRESTAZIONI

Risultati totali per concordanza clinica IgM e IgG

Metodo		2019 nCov - IgM/IgG		
		Positivo	Negativo	Totale
Test rapido COVID-19 IgM/IgG	Positivo	37	0	37
	Negativo	4	92	96
Totale		41	92	133


Sensibilità clinica: 95,92%,

Specificità clinica: 94,00%


## PROCEDURA



Pungere la punta del dito con lancetta in dotazione.

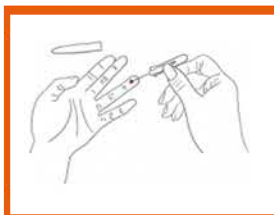

Raccogliere il sangue con la pipetta in dotazione.

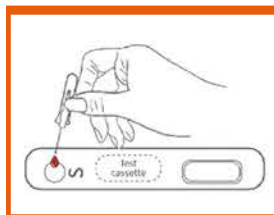

Depositare il sangue raccolto nel pozzetto indicato (S) sulla cassetta.




Svitare il tappo del flaconcino contagocce, depositare 2 gocce nel pozzetto indicato sulla cassetta attendere circa 5 secondi tra la prima e la seconda goccia.






Attendere 10min.

## RISULTATO

### Negativo

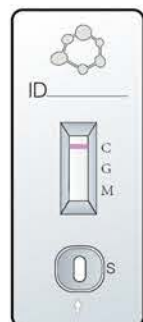

### Positivo

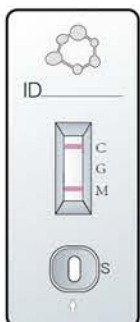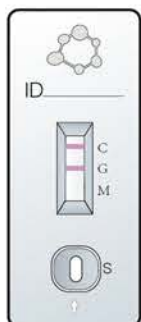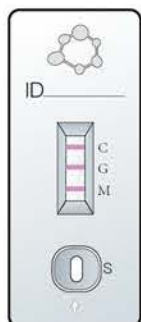

### Non valido

