

COVID-19 Atigen Rapid Test Kit



CARATTERISTICHE

VELOCE

Risultato del test in 15-20 min.

ACCURATO

Sensibilità: 95,05%, Specificità: 99,55%

FACILE DA USARE

Nessuna conoscenza speciale richiesta
Campione di tampone nasofaringeo.



Il test rapido COVID-19 Ag Rapid si basa sull'immunocromatografia per la determinazione qualitativa di antigeni specifici del virus SARS-CoV-2 nel campione di tampone nasofaringeo umano. Il Test COVID-19 Ag Rapid Card fornisce il processo decisionale clinico per i pazienti sospettati di virus SARS-CoV-2 (COVID-19) infezione.

Applicabile a: screening clinico, screening di comunità, medico di famiglia, screening scolastico, screening aziendale, pazienti asintomatici

PRESTAZIONI


Risultati totali della concordanza clinica con Ag

Metodo		2019 Test rapido Antigene		
		Positivo	Negativo	Totale
Test rapido COVID-19 Antigene	Positivo	50	0	50
	Negativo	0	92	92
Totale		50	92	142

Sensibilità clinica: 95,05%

Specificità clinica: 99,55%

PROCEDURA

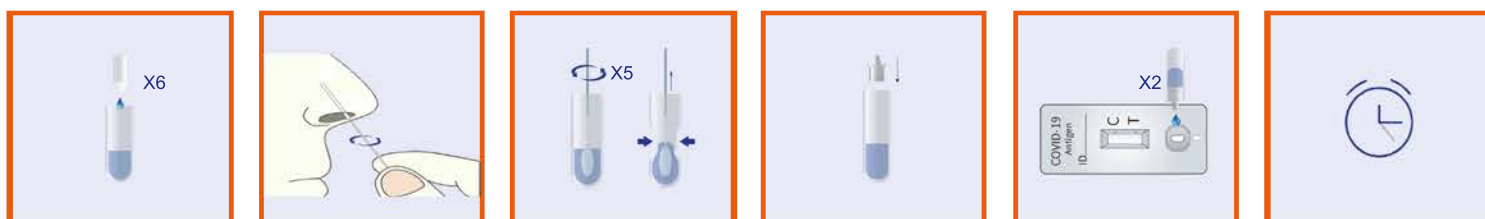

Inserire 6 gocce di liquido reagente nel contenitore in dotazione.

Prelevamento dal naso tramite tampone in dotazione.

Inserire il tampone nel contenitore. Ruota il tampone parecchie volte almeno 5. Rimuovere lentamente il tampone mentre si sprema da i lati del contenitore.

Chiudere il contenitore con il tappo in dotazione.

Dosare 2 gocce di liquido nella cassetta in dotazione.

Attendere 15-20min.

RISULTATO

Negativo



Non valido



Positivo



INFO ORDINE

Modello	GE-COV-01	GE-COV-25
Prodotto	Test Kit	
Descrizione	Test Rapido Antigene	
Contenuto del kit	Test (cassetta) - 1pz Tamponi sterili - 1pz Liquido reagente - 1pz Contenitore ugello - 1pz Istruzioni uso - 1pz	Test (cassetta) - 25pz Tamponi sterili - 25pz Liquido reagente - 1pz (per 25 test) Contenitore ugello - 25 pz Istruzioni uso - 1pz